




MANUAL FONOAUDIOLOGÍA

CONFIGURACIÓN FUNCIONAMIENTO AGX

Para realizar el funcionamiento del equipo
AGX debe seguir los siguientes pasos:



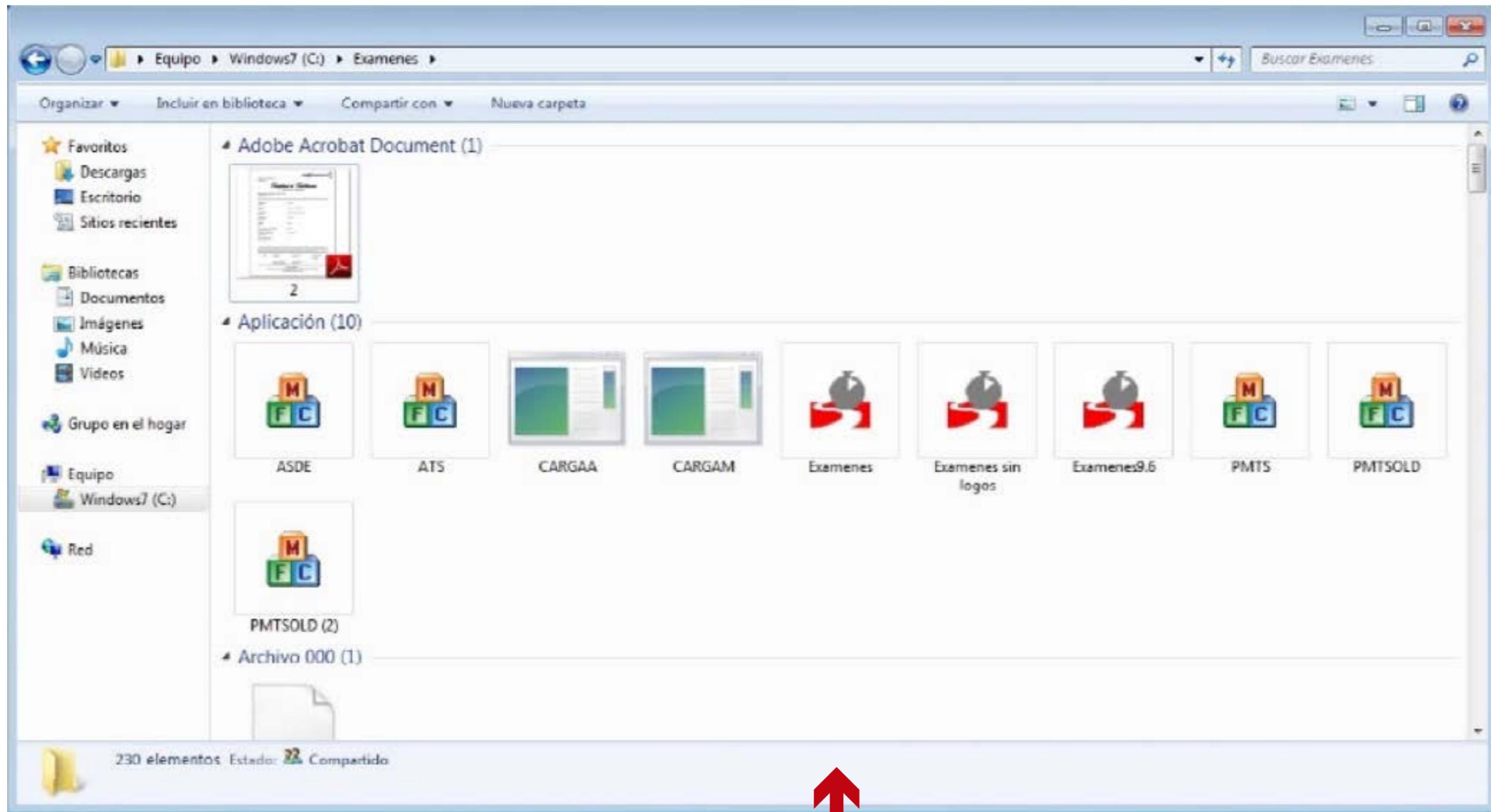

La aplicación para realizar la prueba de audiometría se llama "ATS.exe" en el periférico AGX Q que se encuentra en la ruta "C:\Exámenes".



Al abrir la aplicación "ATS.exe" se vera una ventana como la que se muestra a continuacion, para iniciar la prueba dar en el icono de inicio.

A screenshot of a dialog box titled 'Usuario'. It contains the following fields: 'Nombre' with the value 'LORENA GUTIERREZ', 'Identificación' with a sub-field 'Tipo' set to 'CC' and 'No.' set to '1042753869'. At the bottom are 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons.

Al dar inicio a la prueba se tiene que ingresar el "Nombre" del usuario que realizara la prueba, el "Tipo" de identificación y el "No." De identificación.


Fase de Evaluación

Despues de recibir instrucciones
presione un botón o pedal para iniciar


Responda así:




Después de ingresar los datos requeridos damos
“Aceptar” para realizar la prueba.

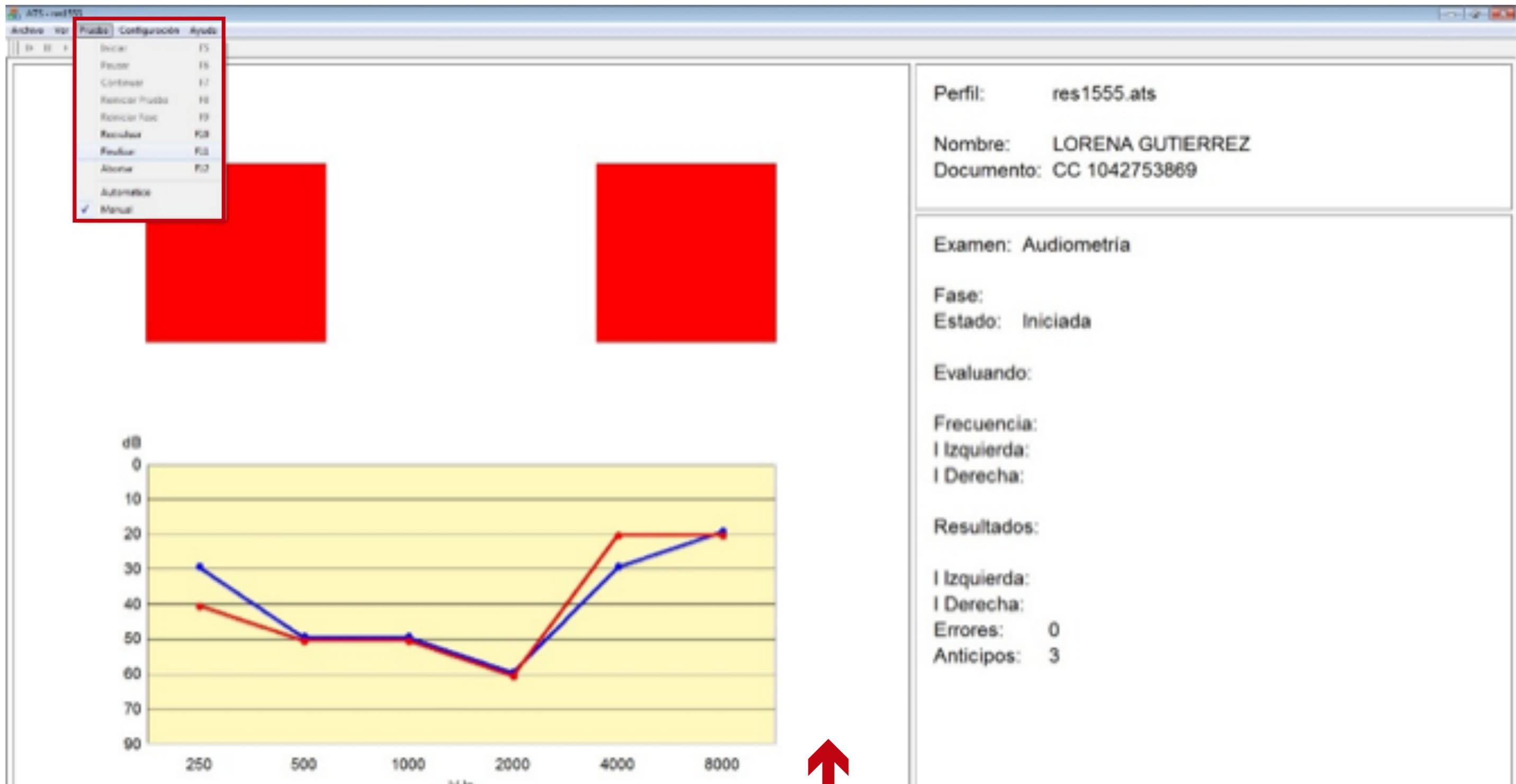


Al terminar la prueba nos aparecerá una ventana como la siguiente, en donde daremos clic en el menú "Prueba" y luego en "Finalizar".

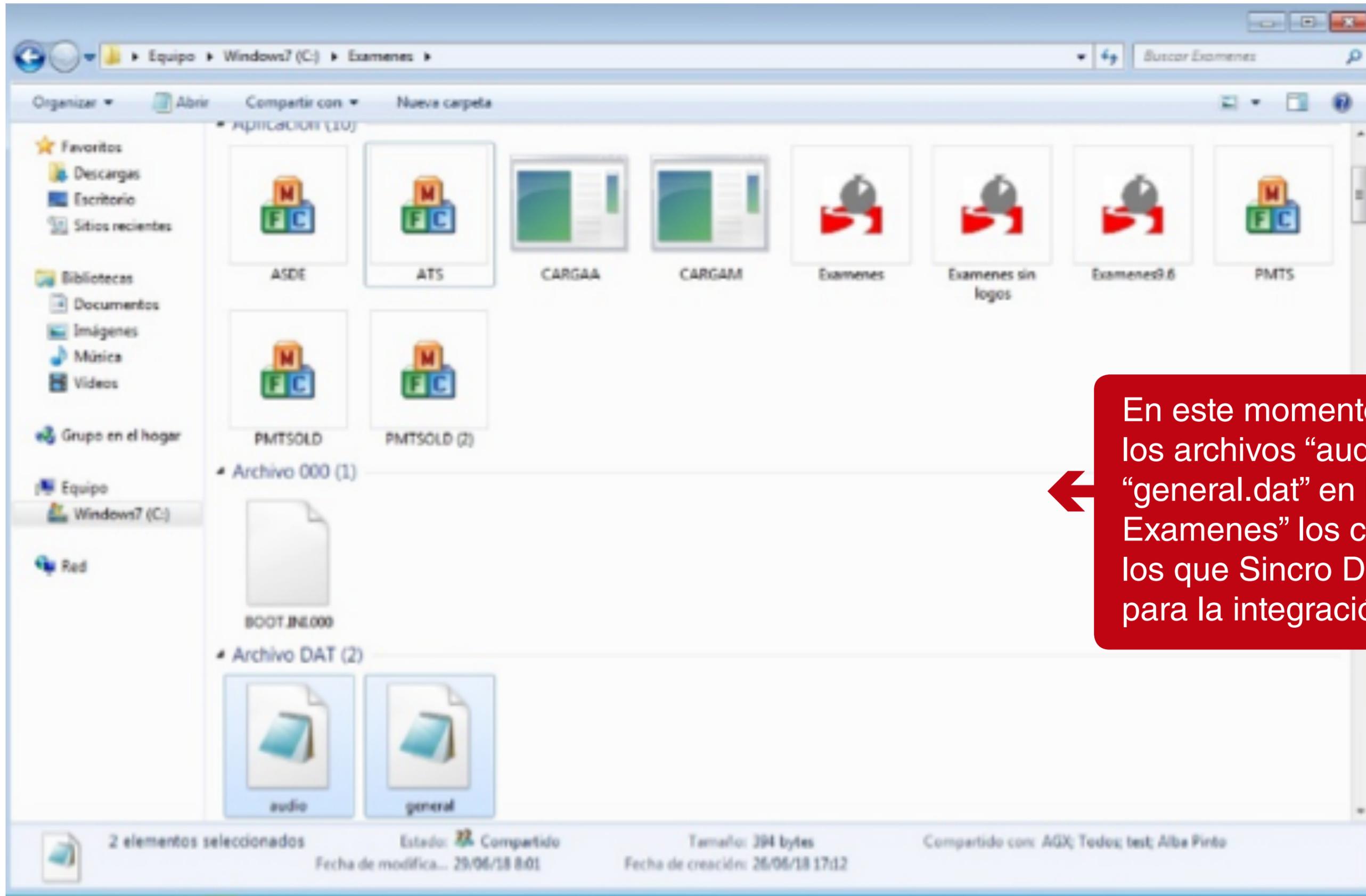


En este momento se crean los archivos "audio.dat" Y "general.dat" en la ruta "C:\Exámenes" los cuales serán los que Sincro Desktop utiliza para la integración.

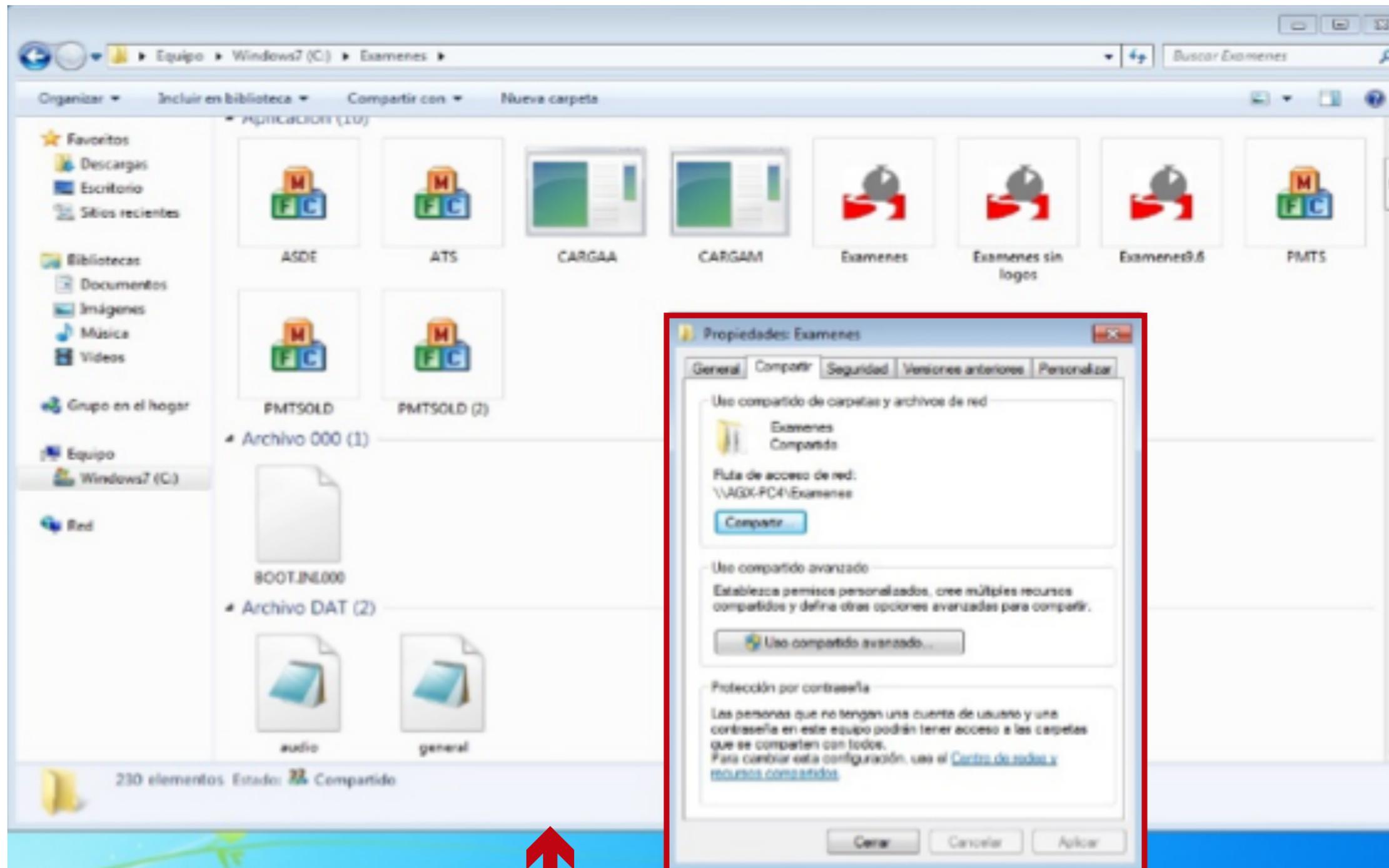


Para que Sincro Desktop tenga acceso a estos archivos se debe compartir la carpeta "C:\Exámenes" con "todos" o un usuario específico. Para compartir la carpeta damos clic derecho en la carpeta y luego en "Propiedades", aparecerá una ventana como la siguiente y luego damos clic en la pestaña "Compartir" y después presionamos el botón "Compartir".

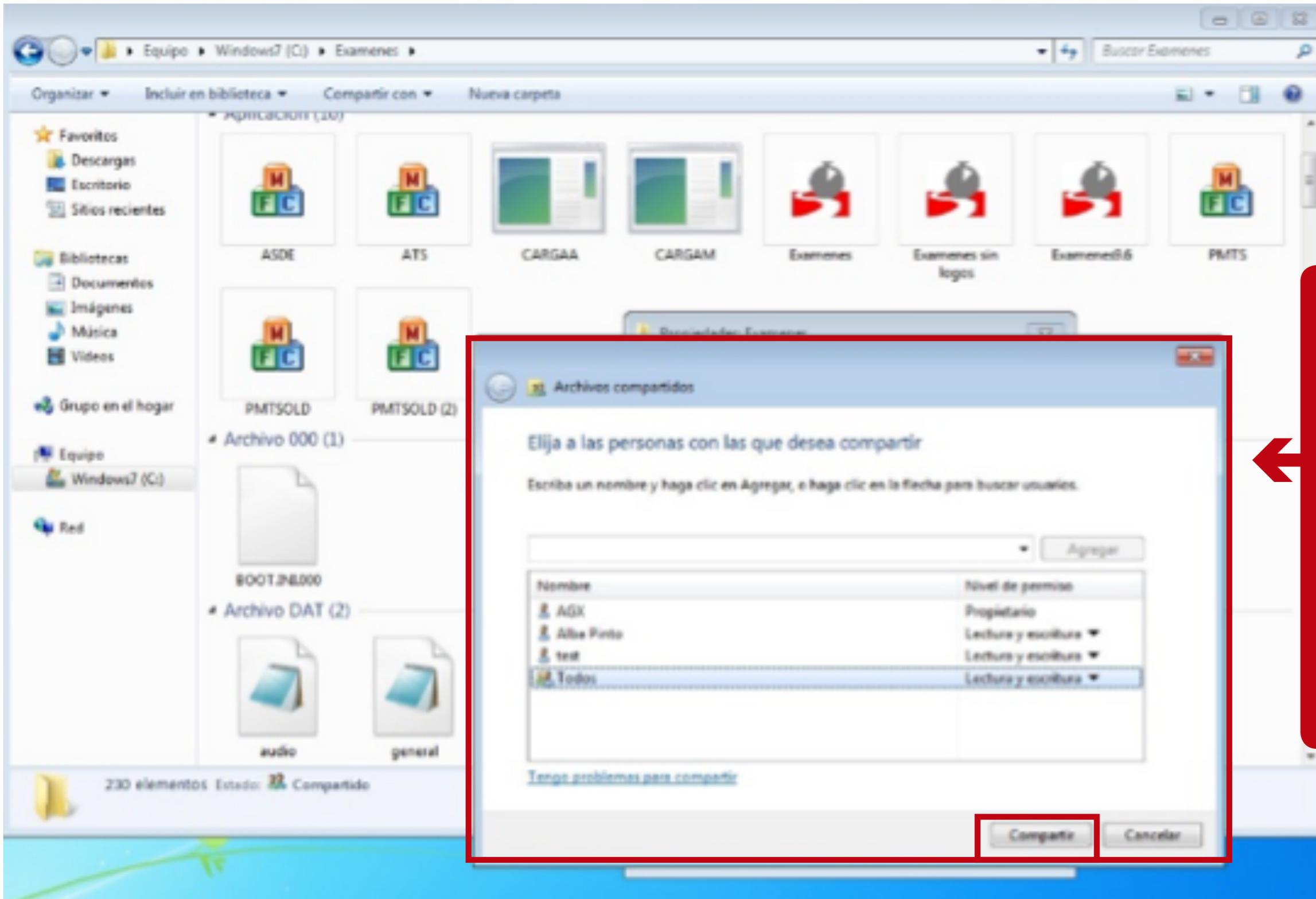

A continuación, nos aparece una ventana como la siguiente, en donde buscaremos el usuario que tendrá acceso a esta carpeta, puede ser "Todos" o un usuario específico ejemplo "test" y damos clic en "Compartir".

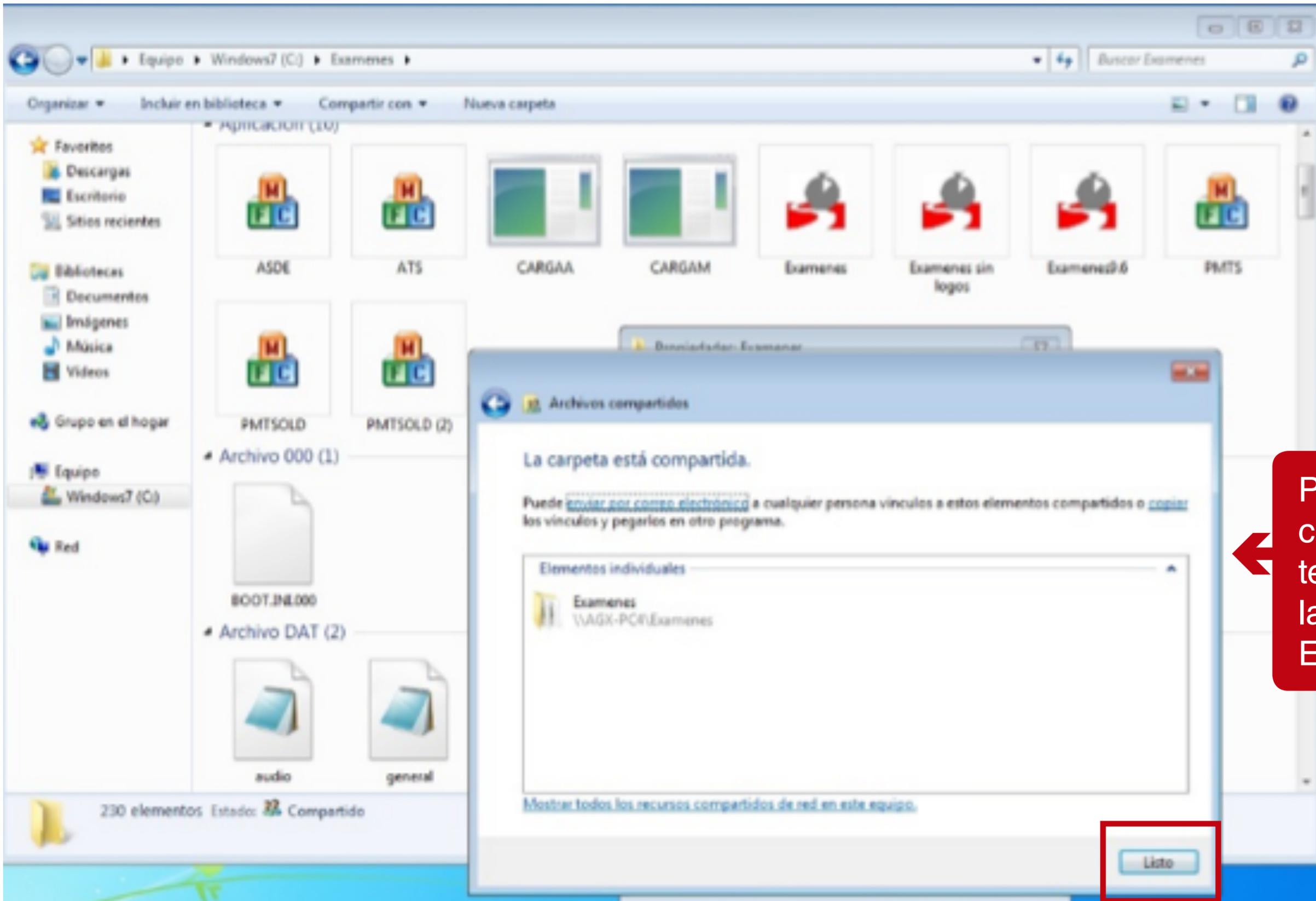

Por último, damos clic en "Listo" y ya tendremos compartida la carpeta de "C:\Exámenes"

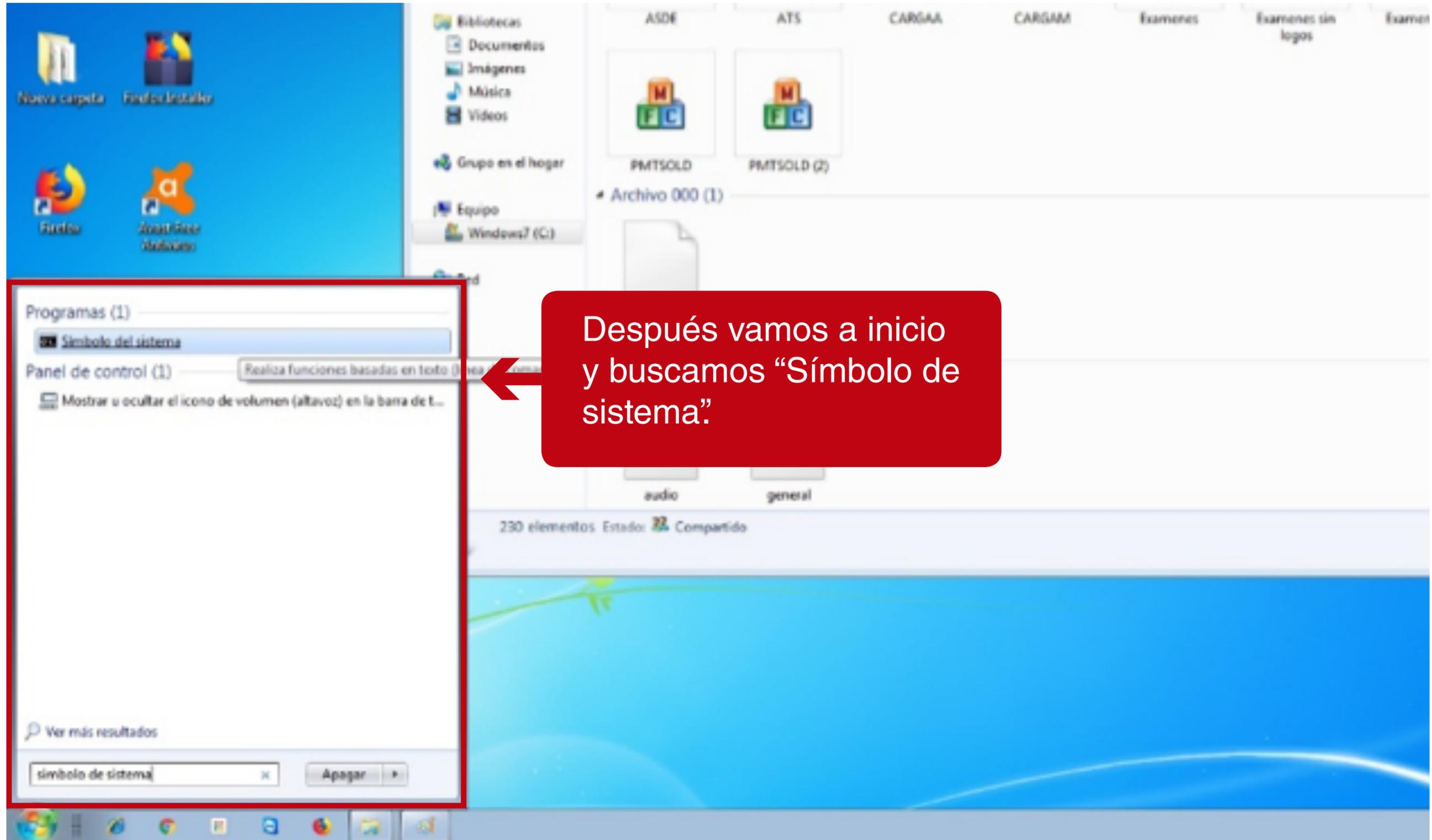

Después vamos a inicio y buscamos “Símbolo de sistema.”

```
Administrador: C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\Users\AGX>ipconfig
Configuración IP de Windows

Adaptador de Ethernet Conexión de Área local:

Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
Sufijo DNS específico para la conexión. . :

C:\Users\AGX>ipconfig
Configuración IP de Windows

Adaptador de Ethernet Conexión de Área local:

Sufijo DNS específico para la conexión. . :
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::1426:f2e1a726:32d6x11
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.14.98
Máscara de subred. . . . . : 255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada. . . . : 192.168.14.1

C:\Users\AGX>
```

← Cuando abra la ventana del “Símbolo de sistema” escribimos ipconfig y presionamos “Enter” nos aparecerá la “Configuración IP de Windows” en donde debemos tomar la “Dirección IPv4”, en este ejemplo sería 192.168.14.98, la cual será la que se configure en Sincro Desktop para acceder a los archivos.



Para realizar la configuración AGX en Sincro Desktop realice los siguientes pasos:





Comprobar Dispositivos

En esta sección podrá realizar pruebas de sus dispositivos para comprobar que los tiene correctamente conectados e instalados en su equipo. También podrá exportar capturas de Foto y Firma a un fichero de imagen en su equipo, por si le resultase de utilidad.



Configuración



Ingrese a configuración en SincroDesktop



Configuración de Sincro Desktop

Version: 1.0.0.10

Equipo Psicotecnico

Perifericos

Ubicacion del examen:

Equipo de Audiometría

Puerto de comunicaciones

Bits por segundo

Perifericos

- Eymasa R 85
- Amplivox
- Oscilla
- AGX**
- ADS PLUS

Equipo Visiometro

Puerto de comunicaciones

Bits por segundo

Perifericos

Equipo de Firma

Pad

Configuración Sincro Web

Imprimir factura en impresora de tirilla

URL

Certif.

Guardar

Seleccione en los periféricos de audiometría la opción "AGX",

Después aparecerán los campos
“Ubicación del Examen,” “Usuario
de Red” y “Contraseña de Red”
como se muestra a continuación:



Equipo de Audiometría

Puerto de comunicaciones	<input type="text"/>
Bits por segundo	0
Perifericos	AGX

Ubicacion del examen:

Usuario de Red:	<input type="text" value="test"/>
Contraseña de Red:	<input type="password" value="*****"/>

IMPORTANTE

Ubicación del examen:

Ruta donde se encuentran los resultados que genera la aplicación “ATS.exe” del AGX, en este ejemplo seria \\192.168.14.98\examenes, con la IP que se configuro en el ítem 1.11 y el nombre de la carpeta que se compartió en el ítem 1.7.

Usuario de Red:

Nombre del usuario configurado en el ítem 1.8 el cual podrá acceder a la carpeta donde se generan los resultados.

Contraseña de Red:

Clave del usuario configurado en el ítem 1.8 el cual podrá acceder a la carpeta donde se generan los resultados.

NOTA:

Si la carpeta donde se encuentran los resultados esta compartida para “todos” los campos “Usuario de Red” y “Contraseña de Red” no son necesarios, de lo contrario deberá especificar cuál será el usuario y su contraseña.