



MANUAL FONOAUDIOLOGÍA

CONFIGURACIÓN EYMASA R-85 Y EYMASA R-95

Para realizar la configuración del equipo Eymasa R-85 y Eymasa R-95 debe seguir los siguientes pasos:



CABLE CONVERTIDOR DE SERIAL A USB

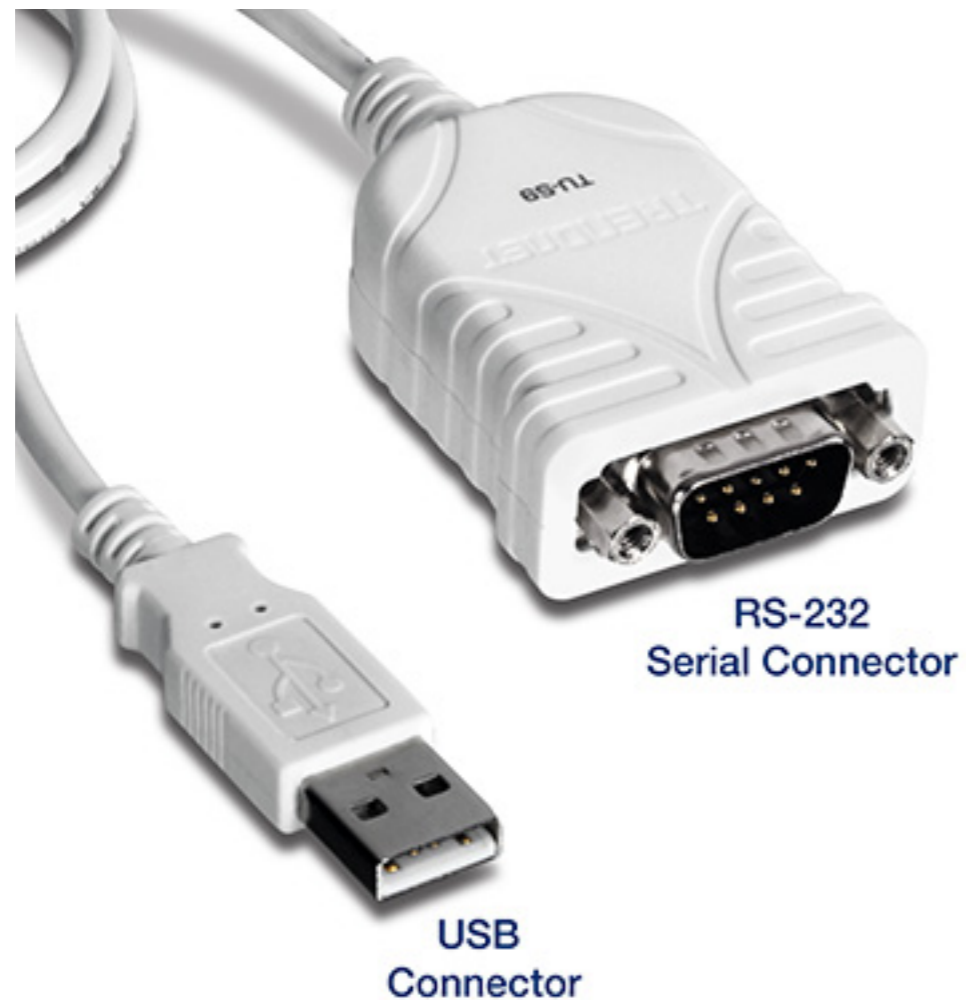


Figura 1. Cable convertidor de serial a USB

El cambio realizado es la integración con el periférico Eymasa es permitir que el usuario lo pueda conectar haciendo uso de un cable conversor del puerto serial a puerto USB (**ver figura 1**), lo demás la configuración es igual a como se encuentra en el manual actual.



Comprobar Dispositivos

En esta sección podrá realizar pruebas de sus dispositivos para comprobar que los tiene correctamente conectados e instalados en su equipo. También podrá exportar capturas de Foto y Firma a un fichero de imagen en su equipo, por si le resultase de utilidad.



Configuración



Ingrese a configuración en
SincroDesktop

Equipo Psicotecnico

Perifericos

Ubicacion del examen:

Equipo de Audiometría

Puerto de comunicaciones

Bits por segundo

Perifericos

Equipo Visiometro

Puerto de comunicaci...

Bits por segundo

↑
Ingrese los parámetros de configuración del equipo audiómetro.

Sincro Desktop


Configuración de Sincro Desktop

Version: 1.0.1.278

Equipo Psicotecnico
Perifericos [dropdown]
Ubicacion del examen: [input]

Equipo de Audiometría
Puerto de comunicaciones [dropdown]
Bits por segundo [input]
Perifericos [dropdown]

Equipo Visiometro

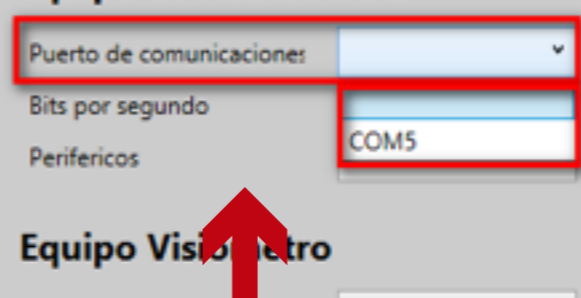

- Para configurar los parámetros, debe tener en cuenta los siguiente:
Conecte el equipo audiómetro, y seleccione el “Puerto de Comunicaciones”

Sincro Desktop

Configuración de Sincro Desktop

Version: 1.0.1.278

Equipo Psicotecnico
Perifericos [v]
Ubicacion del examen: []


Equipo de Audiometría
Puerto de comunicaciones: COM5 [v]
Bits por segundo 9600 [v]
Perifericos [v]

Equipo Visiometro
Puerto de comunicaciones: [v]
Bits por segundo 0 [v]
Perifericos [v]

Configuración Sincro Web
Imprimir factura en impresora de tirilla

Guardar

Diligencie el campo "Bits por segundo".

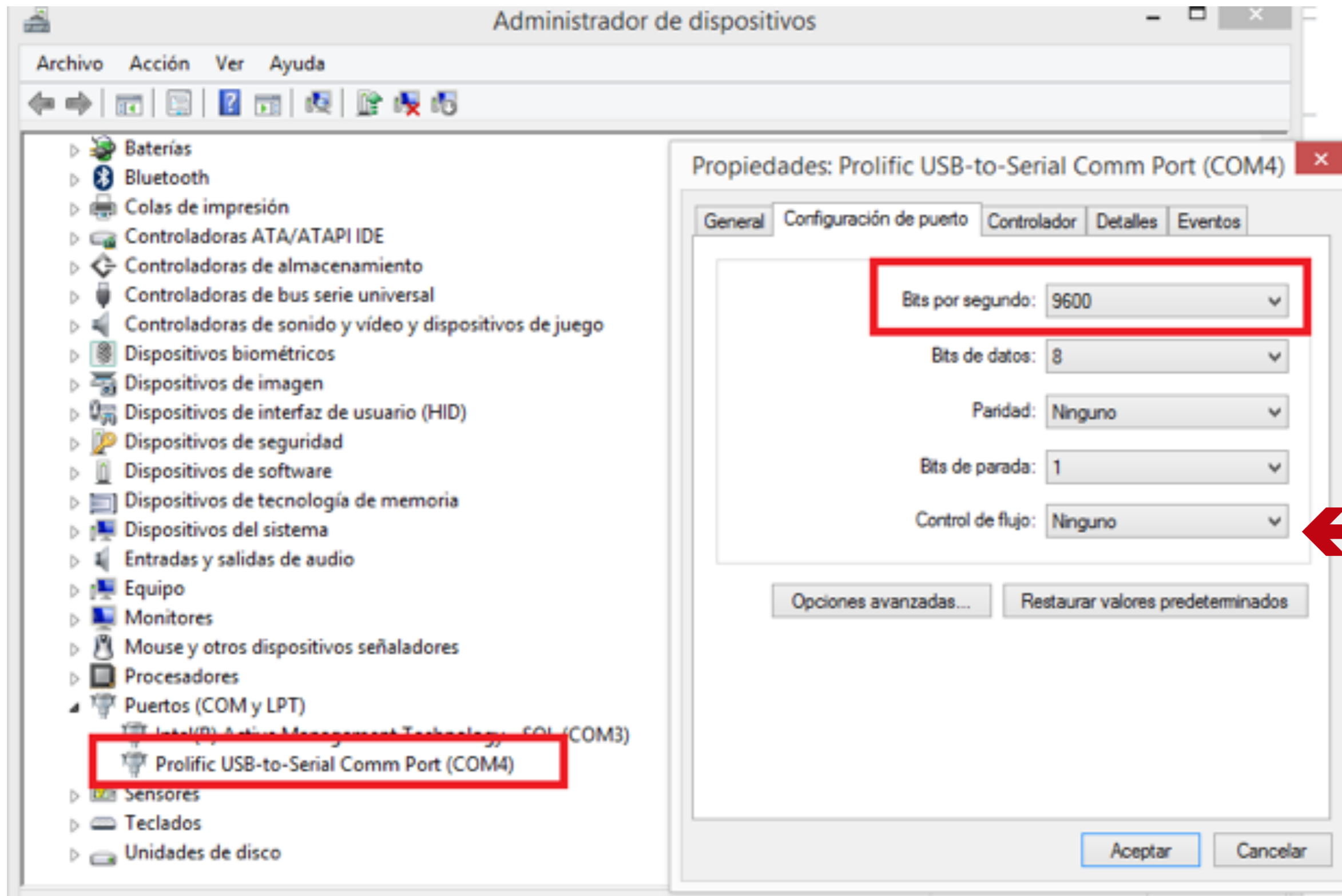

Esta información puede ser obtenida desde el “administrador de dispositivos” en el puerto COM donde está conectado el equipo.

Configuración de Sincro Desktop

Version: 1.0.1.278

Equipo Psicotecnico

Perifericos

Ubicacion del examen:

Equipo de Audiometría

Puerto de comunicaciones: COM5

Bits por segundo 9600

Perifericos

Equipo Visiometro

Puerto de comunicaciones:

Bits por segundo 0

Perifericos

Configuración Sincro Web

Imprimir factura en impresora de tirilla

Guardar

Seleccione el periférico. →

Eymasa R-85

Sincro Desktop

Configuración de Sincro Desktop

Version: 1.0.1.278

Equipo Psicotecnico
Perifericos [dropdown]
Ubicacion del examen: [input] [button]

Equipo de Audiometría
Puerto de comunicaciones: COM5 [dropdown]
Bits por segundo: 9600
Perifericos [dropdown]

Equipo Visiometro Eymasa R-85 [dropdown]
Puerto de comunicaciones: [dropdown]
Bits por segundo: 0
Perifericos [dropdown]

Configuración Sincro Web
Imprimir factura en impresora de tirilla

Haga clic en el botón "Guardar".

Guardar