



MANUAL PSICOLOGÍA
CONFIGURACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PETRINOVIC

Para realizar la configuración **Petrinovic** en Sincro Desktop realice los siguientes pasos:





Comprobar Dispositivos

En esta sección podrá realizar pruebas de sus dispositivos para comprobar que los tiene correctamente conectados e instalados en su equipo. También podrá exportar capturas de Foto y Firma a un fichero de imagen en su equipo, por si le resultase de utilidad.



Configuración



Ingrese a configuración en SincroDesktop

Seleccione el periférico PETRINOVIC e ingrese la "Ubicación del examen", "Usuario de Red" y "Contraseña de Red"

Sincro Desktop

Configuración de Sincro Desktop

Version: Desarrollo

Equipo Psicotecnico

Perifericos: PETRINOVIC

Ubicación del examen: \\192.168.14.98\Exámenes

Usuario de Red: JLONDONO\test

Contraseña de Red: *****

Equipo de Audiometría

Perifericos: [v]

Puerto de comunicaciones: [v]

Bits por segundo: 0

Equipo Visiometro

Puerto de comunicaciones: [v]

Bits por segundo: 0

Perifericos: [v]

Equipo de Firma

Pad: Wacom

Configuración Sincro

Imprimir factura en impresora de tirilla

URL: https://crc.sincro.co:9090

Certif: D:\Gd\Sicov1Agent\Ftr\419-Petrin

Versión Petrinovic: 5.38

Tipos Documentos Petrinovic

Sufijo	Descripción	Valor
CC	Cédula de Ciudadanía	1
CD	Carnet Diplomático	0
CE	Cédula de Extranjería	3
PP	Pasaporte	4
TI	Tarjeta de Identidad	5

Guardar

Sincro Desktop

Configuración de Sincro Desktop

Version: Desarrollo

Equipo Psicotecnico

Perifericos: PETRINOVIC

Ubicacion del examen:
\\192.168.14.98\Exámenes

Usuario de Red: JLONDONO\test

Contraseña de Red: *****

Versión Petrinovic:

Tipos Documentos Petrinovic

Sufijo	Documento	Valor
CC	Cédula	
CD	Carnet	
CE	Cédula	
PP	Pasaporte	
TI	Tarjeta de Identidad	5

Equipo de Audiometría

Perifericos:

Puerto de comunicaciones:

Bits por segundo: 0

Equipo Visiometro

Puerto de comunicaciones:

Bits por segundo: 0

Perifericos:

Equipo de Firma

Pad: Wacom

Configuración Sincro

Imprimir factura en impresora de tirilla

URL: https://crc.sincro.co:9090

Certif: D:\Gd\Sicov1Agent\Ftr\419-Petrin

Guardar

Se visualizará un mensaje en donde indica que se debe ingresar la versión del periférico.

Falta por diligenciar la versión de petrinovic

Aceptar

Versión Petrinovic:

5.38

Permite solo números
y punto decimal

Versión Petrinovic:

538.1

Un máximo de cinco
caracteres

Sufijo	Descripción	Valor
CC	Cédula de Ciudadanía	11
CD	Carnet Diplomático	0
CE	Cédula de Extranjería	3
PP	Pasaporte	4
TI	Tarjeta de Identidad	5

La tabla solo permite ingresar números, con un máximo de dos caracteres.

Tipos Documentos Petrinovic

Sufijo	Descripción	Valor
CC	Cédula de Ciudadanía	11
CD	Carnet Diplomático	
CE	Cédula de Extranjería	3
PP	Pasaporte	4
TI	Tarjeta de Identidad	5

Falta por diligenciar los valores de homologación de petrinovic

Aceptar

Si alguno de los campos no se diligencia, genera mensaje de error, y no permite guardar.

Los datos: "Sufijo y Descripción" no son modificables.

Sufijo	Descripción	Valor
CC	Cédula de Ciudadanía	1
CD	Carnet Diplomático	2
CE	Cédula de Extranjería	3
PP	Pasaporte	4
TI	Tarjeta de Identidad	5

Sincro Desktop

Equipo Psicotécnico

Fecha y hora

Nº Test

Nombre Test


Tipo Doc. CC

Documento 1094244440

Resultado

Vaciar campos Iniciar captura

← Módulo de gestión
"Operación"

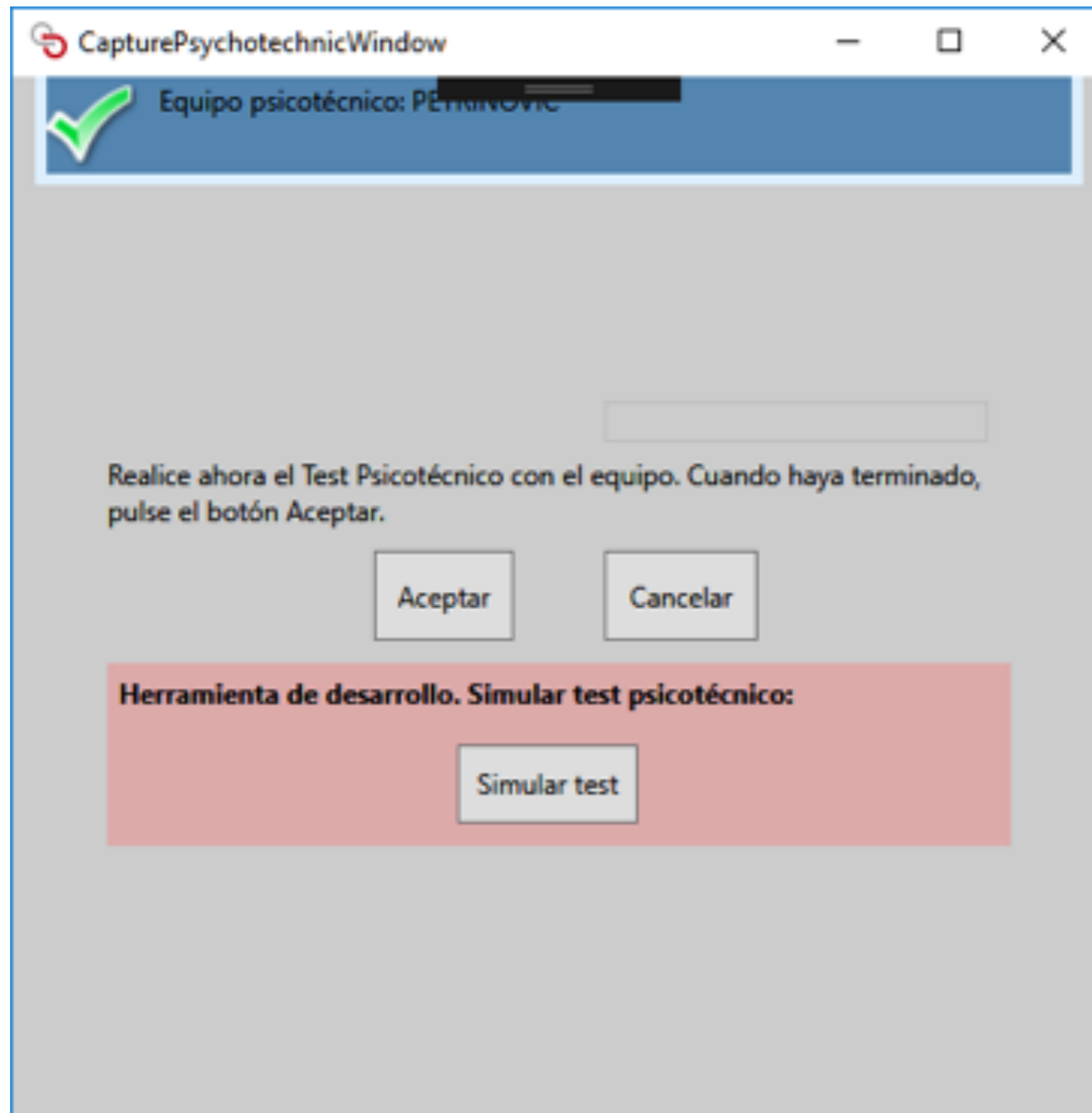


← Ingresa el Tipo de Documento y número simulando él envió desde Sincro CRC Web


Personas										
	CodigoPerso	Apellido1	Apellido2	Nombre1	Nombre2	EstadoCivil	FechaNac	Sexo	TipoDocum	Documento
+	1	Vera	Peña	Francisco	Alexis	Casado(a)	26/09/1974	M	1	88210248
+	2	Mantilla	Basto	Diego	Alejandro	Union libre	01/07/1991	M	1	1094368696
+	3	Rondon	Rincon	Elber	Fabian	Soltero	24/07/1988	M	1	1091052529
+	4	Rodriguez	Gutierrez	Henry		Soltero	17/10/1988	M	1	1118539216
+	5	Lizcano	Vargas	Jorge	Eliecer	Soltero	03/06/1991	M	1	1005078581
+	6	HINCAPIE	TARAZONA	RENSON	JAVIER	Casado(a)	23/11/1990	M	1	1094265873
+	7	VERGARA	DURAN	NEPTALY			10/10/1976	M	1	88160525
+	8	Tarazona	De Mogollon	Ana	Victoria	Casado	23/03/1954	F	1	27686758
+	9	Cerveleon	Capacho	Gerson	Alfonso	Soltero	05/12/1993	M	1	1102372570
+	10	Blanco	Cardenas	Juan	Carlos	Casado	14/04/1980	M	1	88030371
+	11	Corredor	Carreño	Luz	Marina	Union libre	06/10/1979	F	1	37729778
+	12	MONCADA	GELVEZ	OSCAR		Casado(a)	23/08/1981	M	1	88031356
+	13	Prueba		Control		Soltero	04/04/1980	M	1	04042012
+	14	Prueba		Control		Soltero	09/04/1980	M	1	09042012
+	15	GAFARO	ARAQUE	JHON	EDISON	UnionLibre	10/01/1988	M	1	1094244440
+	16	Contreras	Carrillo	Luz	Elena	Soltero	02/12/1991	F	1	1094267869

Se visualizan en la base de datos de Petrinovic la información del usuario.

Trae la información.

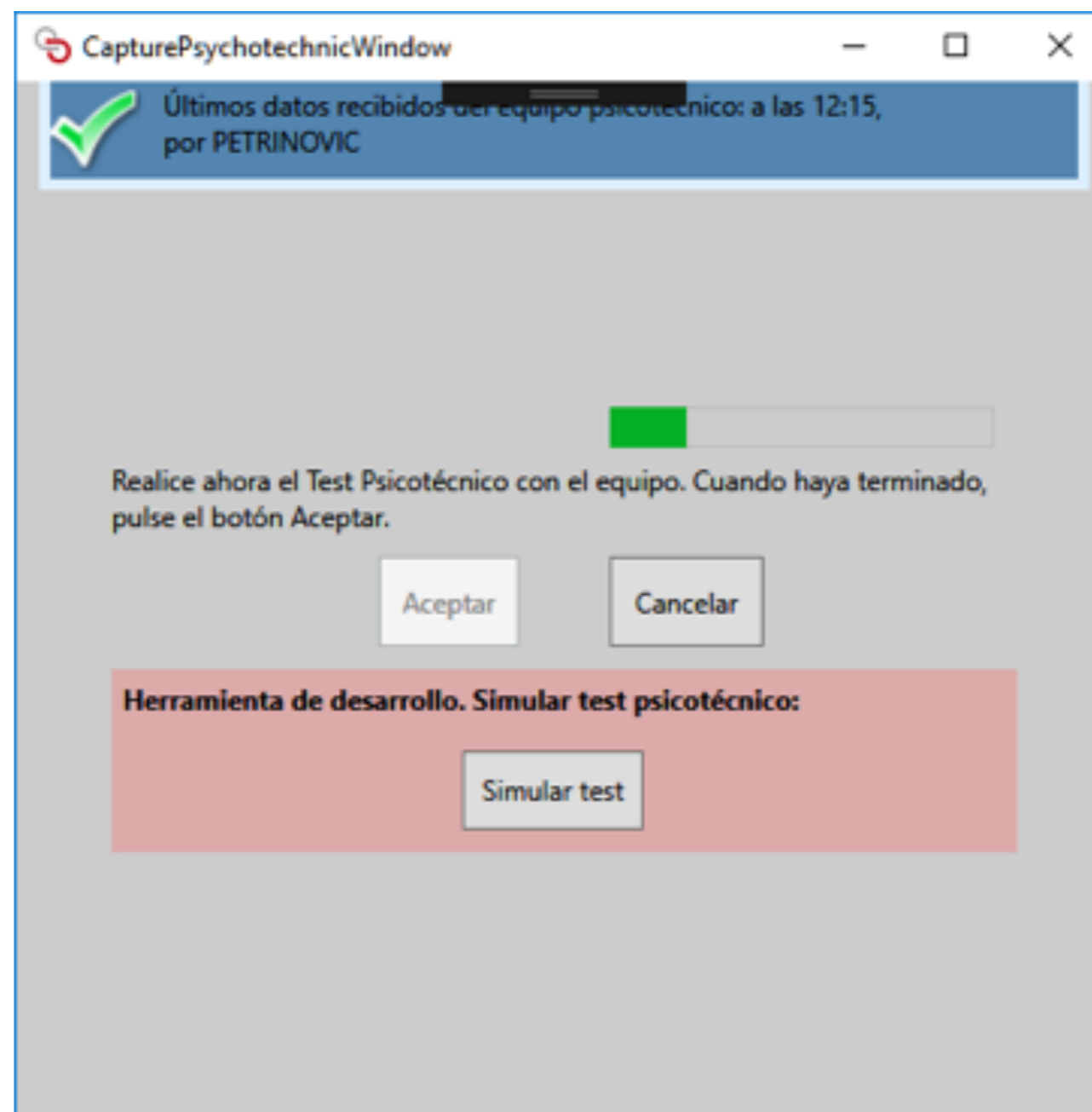

Sincro Desktop

 **Equipo Psicotécnico**

Fecha y hora: 27/08/2018 12:16

Nº Test: CAPTURA INFORMACION PETRINOVIC

Nombre Test: CAPTURA INFORMACION PETRINOVIC

Tipo Doc.: CC

Documento: 88030760

Resultado

Atención concentrada :
Average Response Time -> -4
Wrong Response Stimulus -> 0
Reacciones múltiples :
Average Response Time -> 0
Wrong Response Stimulus -> 3
Test de velocidad de anticipación:
Average Absolute Deviations -> 23
Coordinación bimanual :
Total Disjoint Time Error -> 4
Total Disjoint Quantity Error -> 11
Frenado :
Average Response Time -> 0
Errors By Anticipation -> 0
Errors By Confusion -> 0
Errors By No Response -> 0

Vaciar campos Iniciar captura

Los datos son devueltos al portal Web. Usando el mismo formato actual.



Comprobar Dispositivos

En esta sección podrá realizar pruebas de sus dispositivos para comprobar que los tiene correctamente conectados e instalados en su equipo. También podrá exportar capturas de Foto y Firma a un fichero de imagen en su equipo, por si le resultase de utilidad.



Configuración



Ingrese a configuración en SincroDesktop

Equipo Psicotecnico

Perifericos

PETRINOVIC EPP021

Ubicacion del examen:

Ingrese los parámetros de configuración del equipo psicotécnico.

Equipo Visiometro

Puerto de comunicaciones

Bits por segundo

Perifericos

Equipo de Firma

Pad

Signotec

Configuración Sincro Web

Imprimir factura en impresora de tirilla


URL

http://localhost:49187

Certif:


D:\SGD\Sicov1Agent\agx-ads\S


Guardar

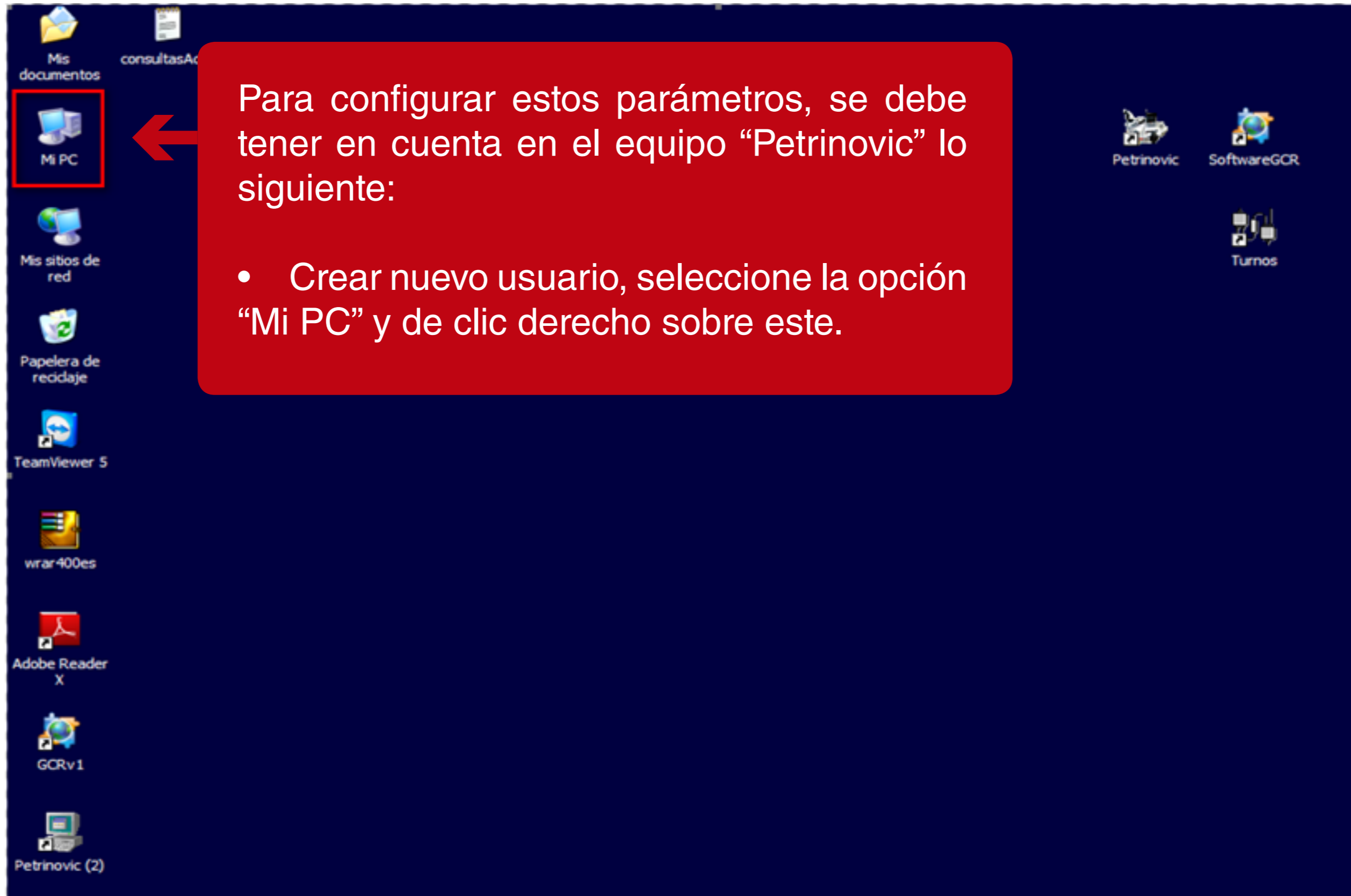



Para configurar estos parámetros, se debe tener en cuenta en el equipo "Petrinovic" lo siguiente:


- Crear nuevo usuario, seleccione la opción "Mi PC" y de clic derecho sobre este.

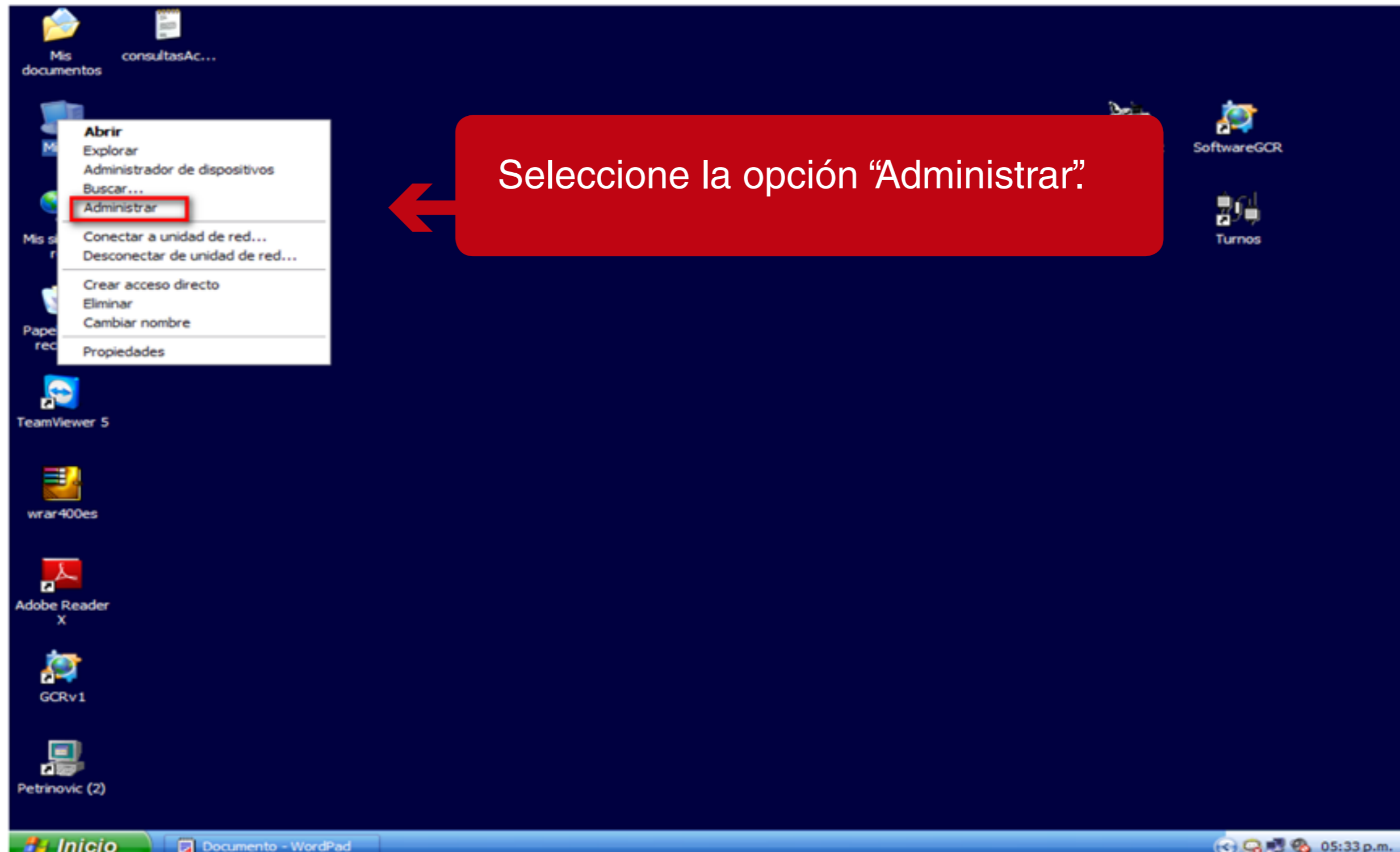

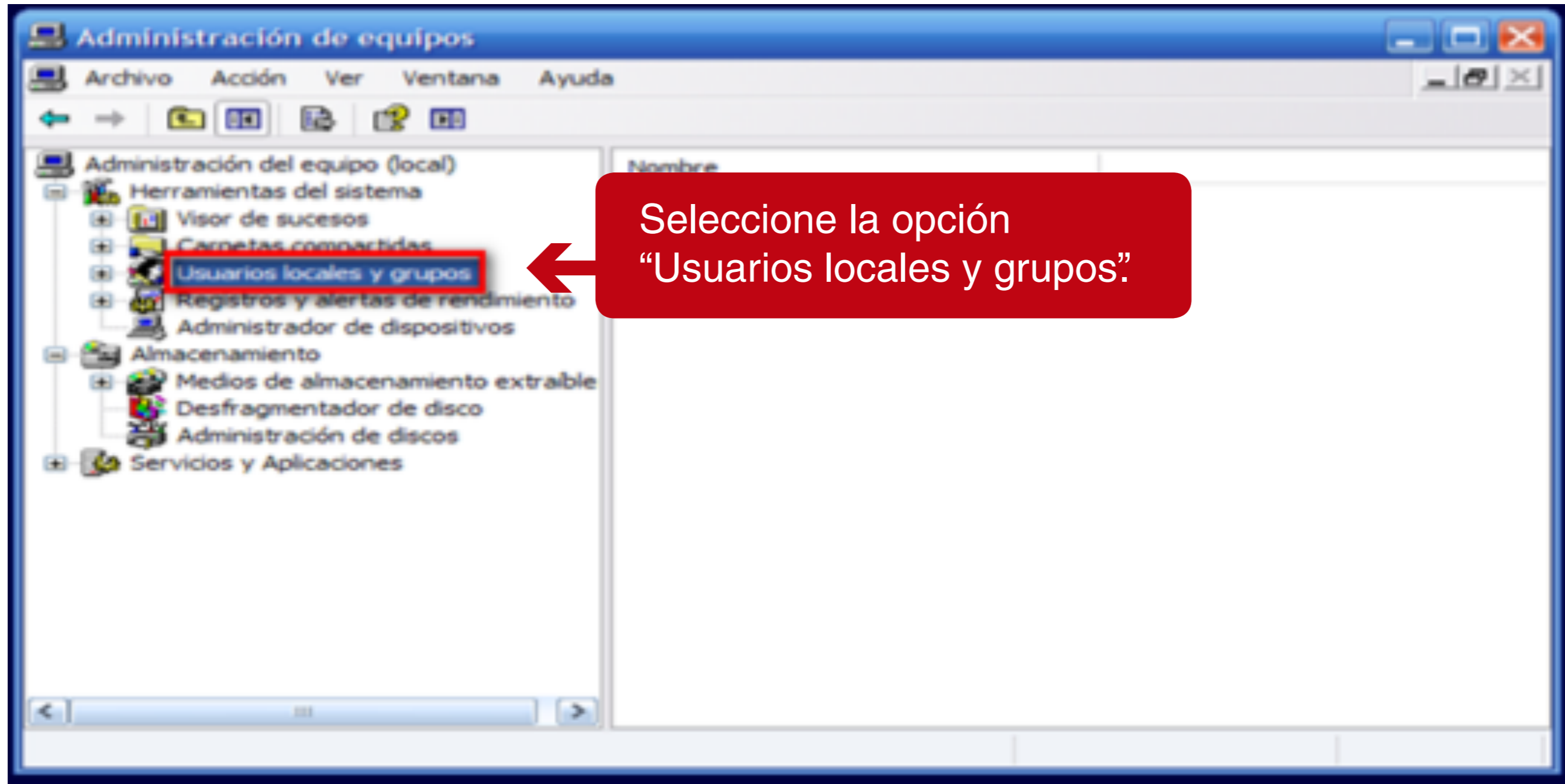

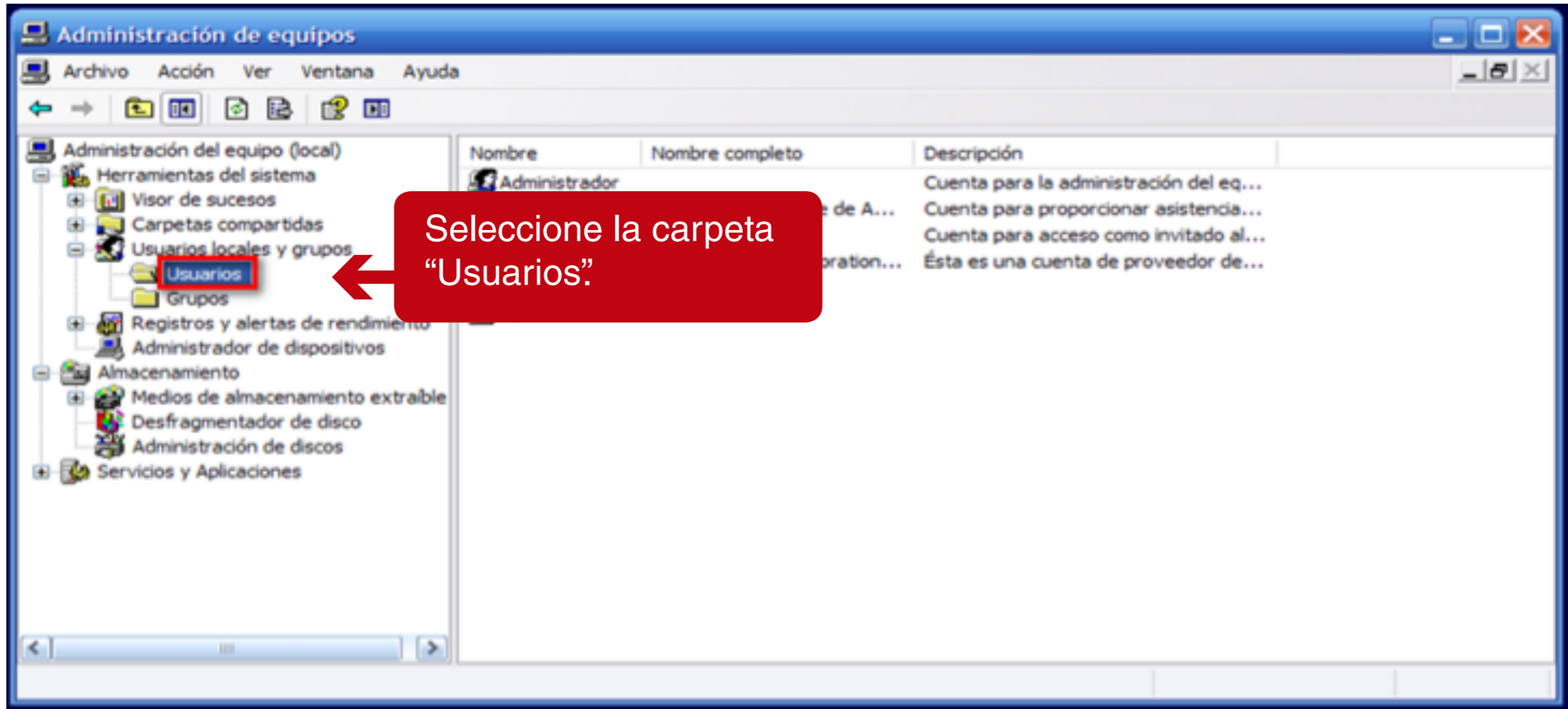


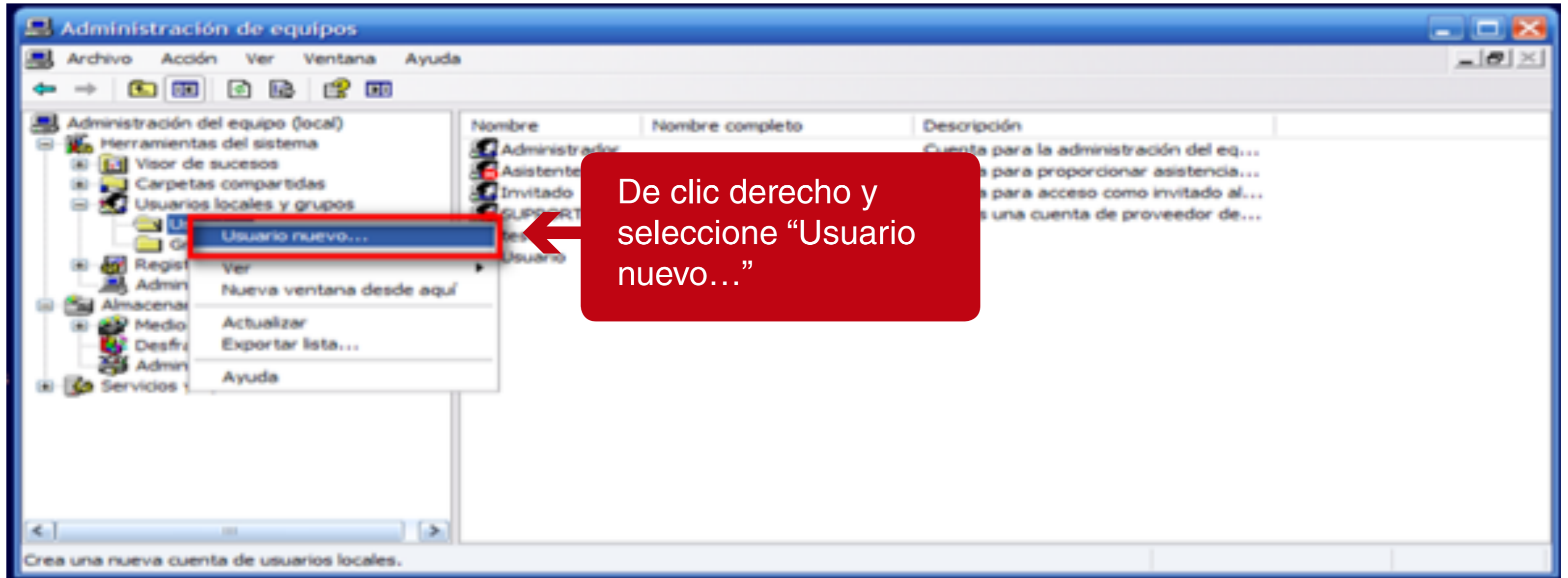

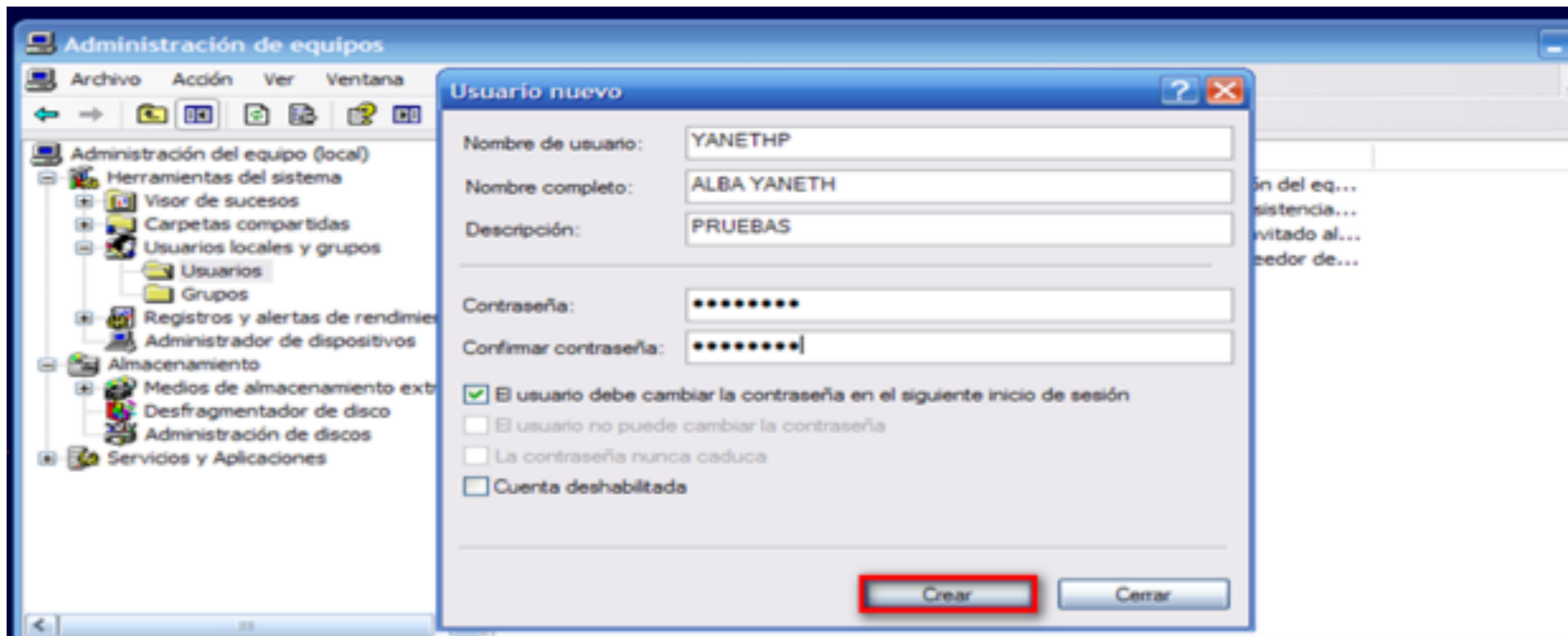


↑

Ingrese los datos solicitados en el formulario y de clic en el botón "Crear".

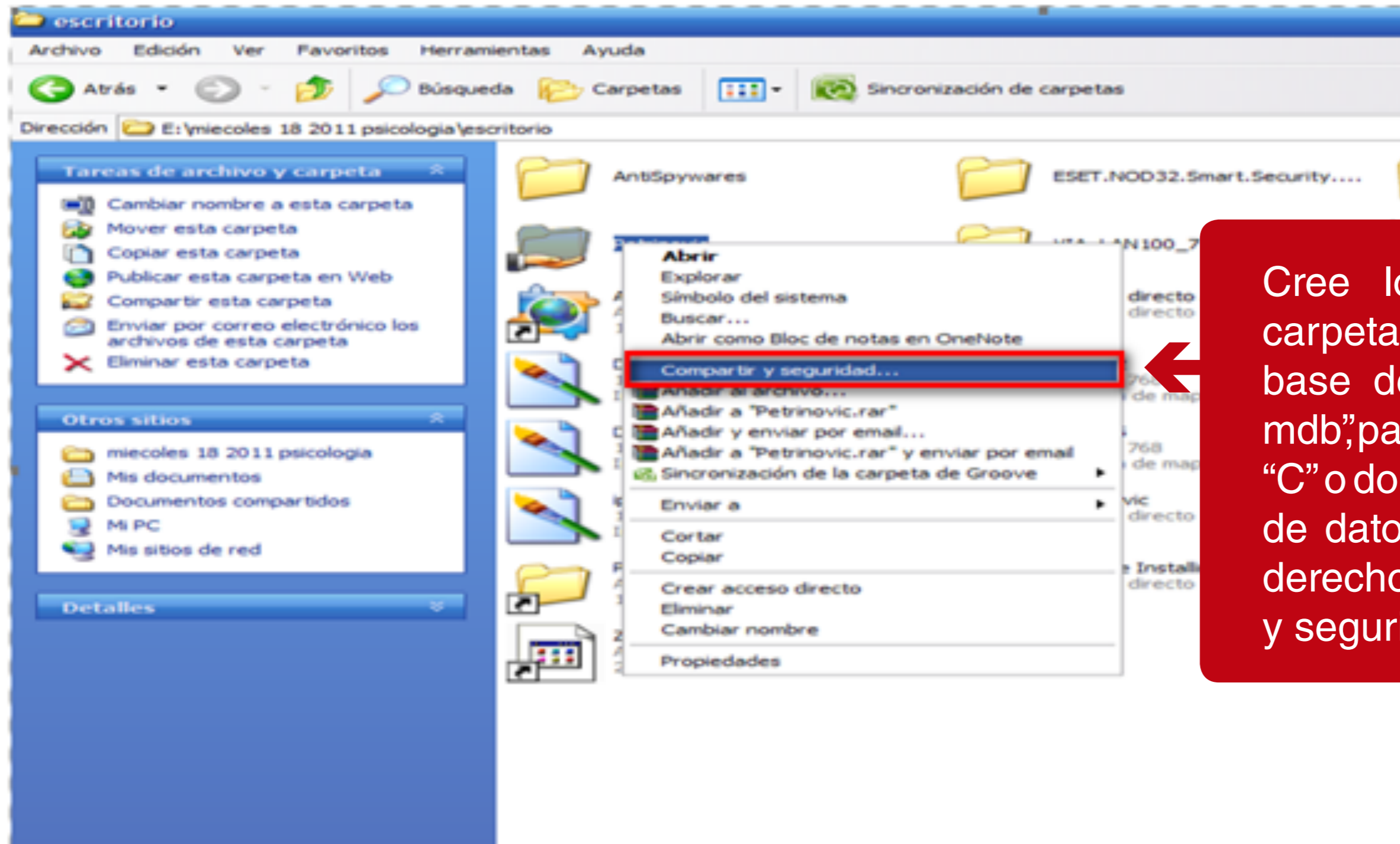


Cree los permisos sobre la carpeta donde se encuentra la base de datos "Base general.mdb", para esto ingrese a la unidad "C" o donde se encuentre la base de datos de PETRINOVIC, clic derecho en la opción "Compartir y seguridad".

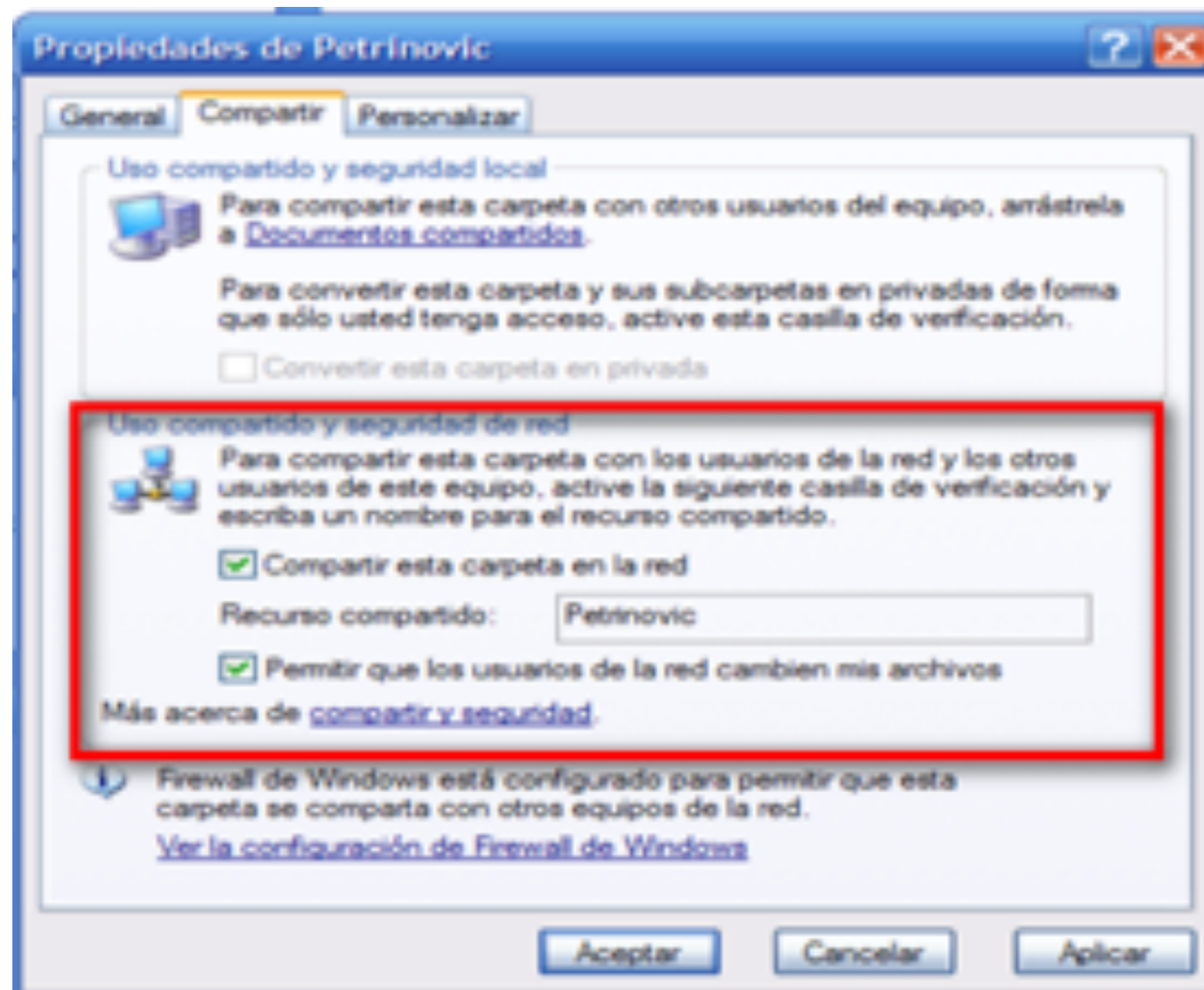

En la ventana que se muestra ingrese a la pestaña "Compartir" y seleccione las opciones "compartir esta carpeta en la red" y "permitir que los usuarios de la red cambien mis archivos" de la sección "Uso compartido y seguridad de red", haga clic en "Aplicar" y "Aceptar".


```
C:\Windows\system
Microsoft Windows [Versión 6.3.9600]
(c) 2013 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados
C:\Users\Usuario>START \\10.0.0.12
C:\Users\Usuario>
```

Desde el equipo del psicólogo, ingrese a una ventana de comandos y allí digite el comando "START \\[IP_PETRINOVIC]", en donde [IP_PETRINOVIC] es la dirección IP del equipo PETRINOVIC.

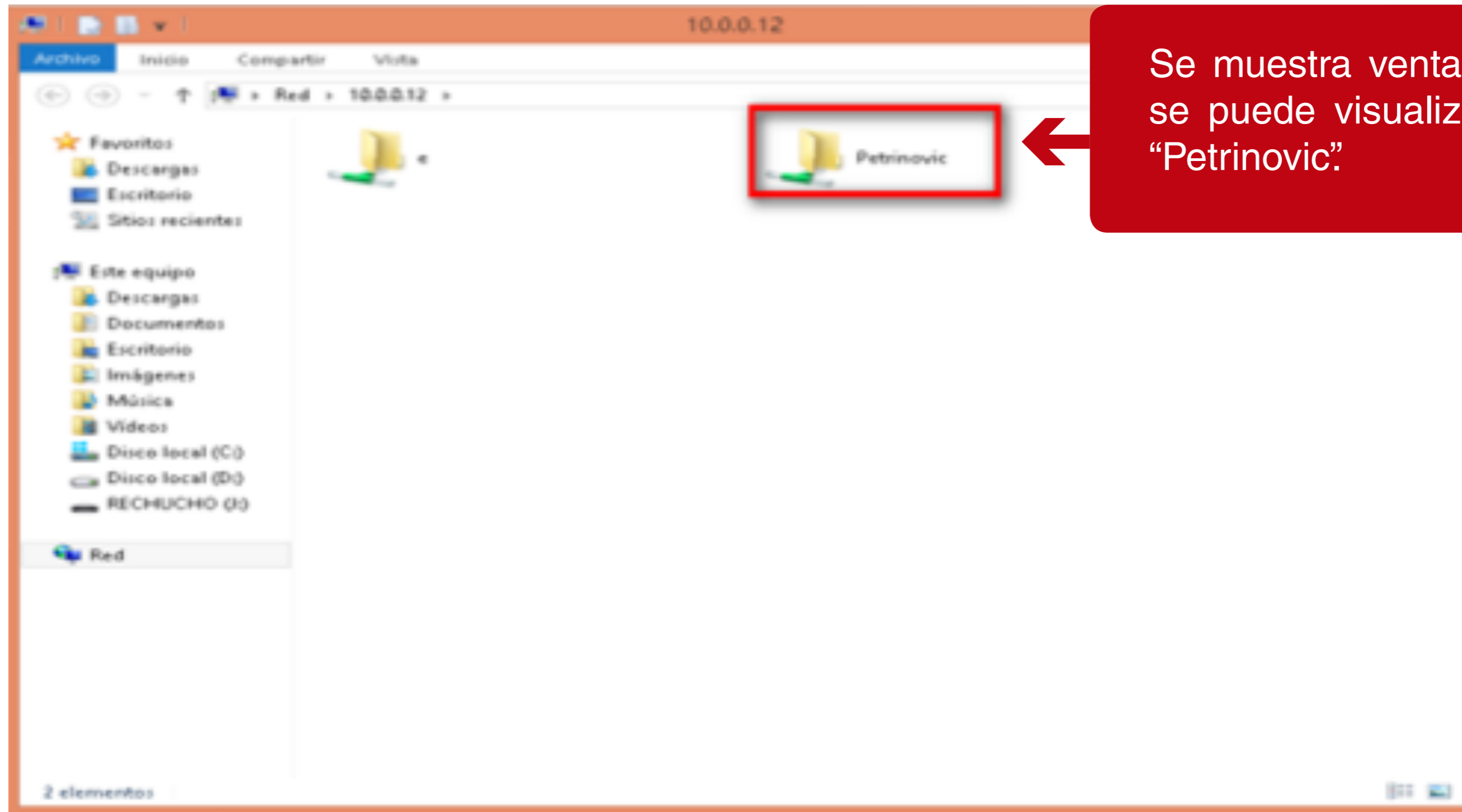

Se muestra ventana en la que se puede visualizar la carpeta "Petrinovic".

