



MANUAL PSICOLOGÍA
CONFIGURACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
LNDETER 100M1

Para realizar la configuración LNDeter 100M1 en Sincro Desktop realice los siguientes pasos:





Comprobar Dispositivos

En esta sección podrá realizar pruebas de sus dispositivos para comprobar que los tiene correctamente conectados e instalados en su equipo. También podrá exportar capturas de Foto y Firma a un fichero de imagen en su equipo, por si le resultase de utilidad.



Configuración



Ingrese a configuración en SincroDesktop

Equipo Psicotecnico


Perifericos

LNDeter 100M1

Ubicacion del examen:

Ingrese los parámetros de configuración del equipo psicotécnico.

Equipo Visiometro

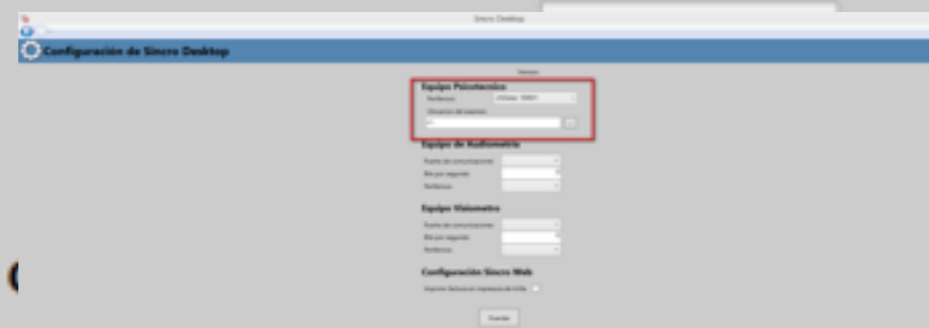

Equipo de Firma

Pad

Signotec

Imprimir factura en impresora de tirilla


URL

http://localhost:49187

Certif:


D:\SGD\Sicov1Agent\agx-ads\S


Guardar

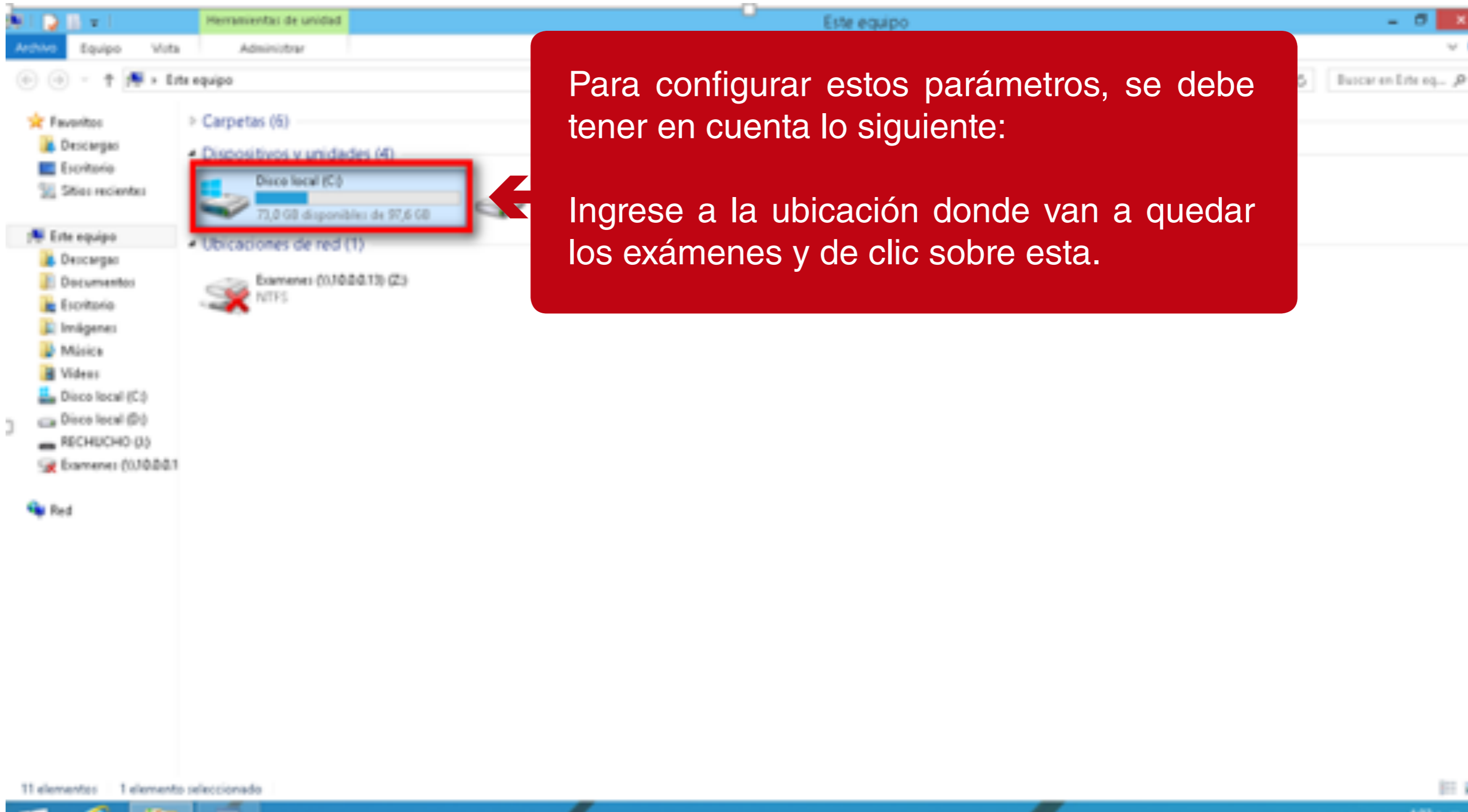

Para configurar estos parámetros, se debe tener en cuenta lo siguiente:

Ingrese a la ubicación donde van a quedar los exámenes y de clic sobre esta.

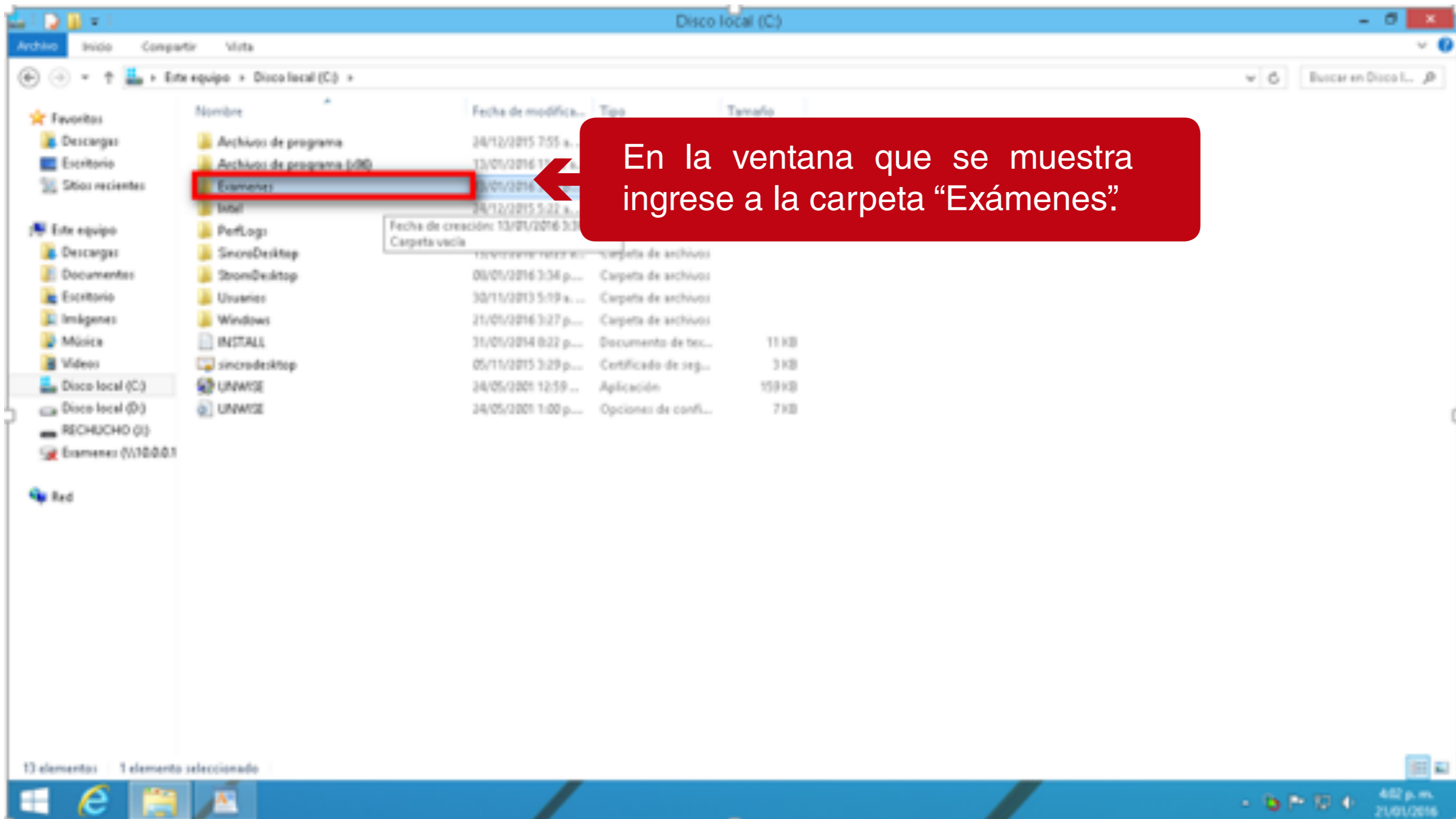

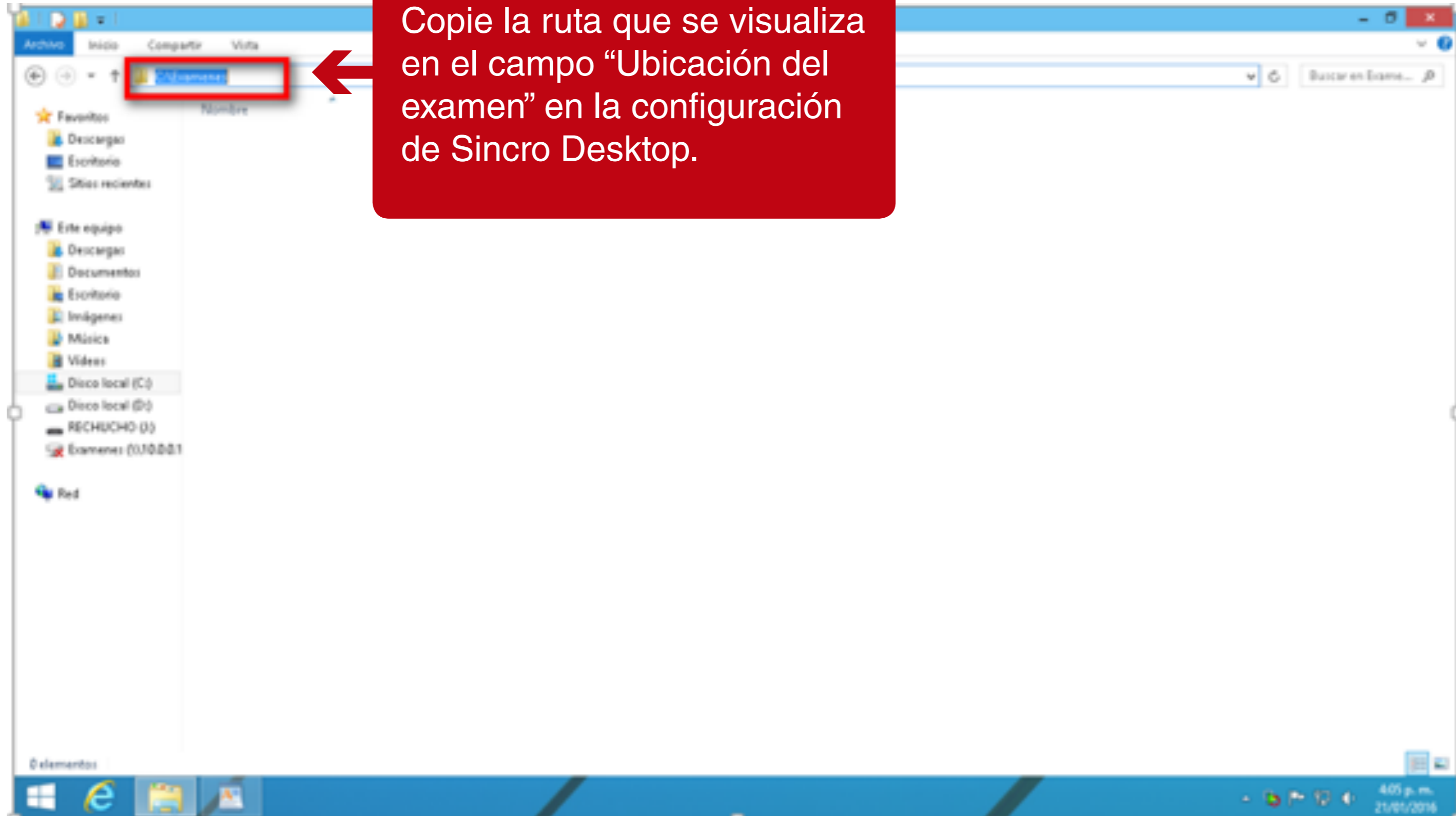

Configuración de Sincro Desktop

Version: 1.0.1.267

Equipo Psicotecnico

Perifericos LNDeter 100M1

Ubicacion del examen:

C:\Exámenes

Equipo de Audiometría

Puerto de comunicaciones:

Bits por segundo 0

Perifericos

Equipo Visiometro

Puerto de comunicaciones:

Bits por segundo 0

Perifericos

Configuración Sincro Web

Imprimir factura en impresora de tirilla

Guardar

Ingrese en el campo
"Periféricos" la opción
"LNDeter 100M1".

Configuración de Sincro Desktop

Version: 1.0.1.267

Equipo Psicotecnico

Perifericos

Ubicacion del examen:

Equipo de Audiometría

Puerto de comunicaciones

Bits por segundo

Perifericos

Equipo Visiometro

Puerto de comunicaciones

Bits por segundo

Perifericos

Configuración Sincro Web

Imprimir factura en impresora de tirilla

De clic en el botón
"Guardar".